


Vejledning til strandkørestol

Har du en funktionsnedsættelse, kan du med hjælp af strandkørestolen komme i vandet fra strandkanten.

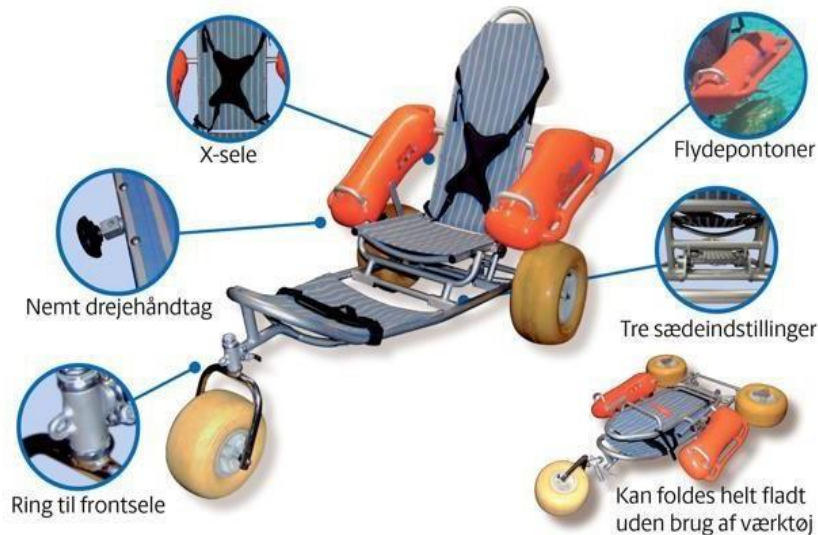

Beskrivelse af strandkørestolen

Strandkørestolen er et hjælpemiddel på tre terrængående store hjul, der med hjælp kan trækkes/ skubbes fra vej, sti, over sand og ud i vandet fra strandkanten. Det anbefales, at to personer hjælper, når en voksen anvender strandkørestolen - så én trækker, mens den anden skubber.

Strandkørestolen flyder i vandet og har stabilitet ved hjælp af flydepontoner i armlænet og luften i de tre hjul.

- Brugeren kan sidde i en behagelig siddeposition både på stranden og i vandet.
- Stolen kan indstilles i tre sædepositioner afhængig af personens størrelse (ved træk i kæde).
- Den har en X-sele i sædet, og på stolen er der også en sele til benene, som kan bruges ved behov.
- Der er ekstra håndtag på armlænet, så brugeren kan føle yderligere tryk og sikkerhed.

Hvem kan bruge stolen?

Strandkørestolen kan bruges af alle børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser/ kørestolsbrugere. Maksimal vægt ved brug er 150 kg.

Sikkerhedsmæssige krav - skal følges nøje for tryk og sikker brug

- Brugeren i strandkørestolen skal **sidde fastspændt i selen**.
- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at brugeren i strandkørestolen har redningsvest på. **Der stilles ikke en redningsvest til rådighed. Denne skal medbringes af brugeren.** Der er eventuelt mulighed for at låne en redningsvest i Sejlklubben.
- Der skal altid være **1 eller 2 personer**, som skubber kørestolen ud i vandet og holder fast i stolen, så den ikke driver til havs.
- Strandkørestolen **skal bruges fra strandkanten** og ikke fra moler og badebroer.
- Det skal vurderes, om der er **badeegnede forhold** på stranden (svag strøm, svag vind, små bølger og god sigtbarhed). Tjek gerne med TrykFondens livreddere om det er forsvarligt.
- Følg ydermere altid de generelle retningslinjer på stranden.

På eget ansvar

- Lån af strandkørestolen er på **eget ansvar**.

Hvor må strandkørestolen bruges?

- Strandkørestolen må kun bruges på **Storstranden i Juelsminde**, hvor der er livreddere.

Udlån

- I perioden den 28. juni - 22. august 2025, i tidsrummet kl. 10.00 - 17.00.
- Nøgle udleveres ved **Juelsminde Fisk**, fiskeforretningen på havnen, i tidsrummet kl. 10.00 - 17.00.
- Strandkørestolen hentes i **kajakklubbens lagerbygning med indgang ved Juelsminde Sejlklub Juniorhus, Havnen nr. 8**.
- Porten åbnes og strandkørestolen skubbes ud. Porten lukkes indefra. Udgang via Juelsminde Sejlklub Juniorhus. **Husk at låse døren**. Porten kan være åben, hvis sejlklubbens medlemmer er der.
- Efter 'først til mølle-princippet'. Kan ikke forud reserveres.

Aflevering af strandkørestolen

- Strandkørestolen afleveres på den anviste plads, hvor den blev hentet ved **Juelsminde Sejlklub, i kajakklubbens lagerbygning** i samme stand som man modtog den. Skal være skyllet ren for sand. Anvend bruseren ved badebroen.
- Porten lukkes indefra. Udgang via Juelsminde Sejlklub Juniorhus. **Husk at låse døren**.
- Nøgle afleveres ved **Juelsminde Fisk** senest kl. 17.00.



Forskellige instruktionsvideoer

Dansk



Engelsk



Vedligeholdelse og drift: Kontakt Hedensted Kommunes turistbil på telefon 21 32 29 23.

Strandkørestolen er bevilget af Udvalget for Social Omsorg, Hedensted Kommune.